


Ξεκινάμε

Κατεβάστε την εφαρμογή Owlet.





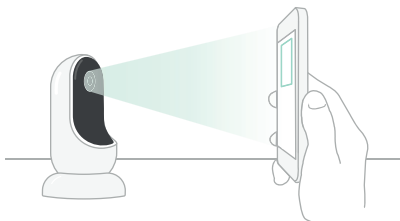

Συνδέστε την κάμερα, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής και αντιστοιχίστε την με το λογαριασμό σας Owlet.

Εάν έχετε ήδη κατεβάσει την εφαρμογή Owlet, κάντε κλικ στην ενότητα Λογαριασμός για να προσθέσετε μια νέα συσκευή.



Λάβετε υπόψη σας ότι η κάμερα μπορεί να μεταδίδει βίντεο και ήχο μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένου δικτύου Wi-Fi. Συνδέστε την κάμερα μόνο σε ιδιωτικό δίκτυο που είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης.

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης της κάμερας Owlet Cam

-  (αναβοσβήνει με κόκκινο/μπλε χρώμα) Η κάμερα μπορεί τώρα να συνδεθεί με την εφαρμογή.
-  (ανάβει με κόκκινο χρώμα) Ο χρήστης πραγματοποιεί streaming μέσω της εφαρμογής.
-  (αναβοσβήνει με μπλε χρώμα) Η κάμερα συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
-  (ανάβει με μπλε χρώμα) Η κάμερα είναι συνδεδεμένη στο Internet. Η εφαρμογή δεν κάνει streaming/δεν μεταδίδει ροή.

Επιλέξτε την επιθυμητή λήψη


Τοποθετήστε την κάμερα και όλα τα καλώδια σε απόσταση 1 m από την άκρη της κούνιας. Τα καλώδια σε απόσταση 1 m από την άκρη της κούνιας πρέπει να καλύπτονται.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την κάμερα με δύο τρόπους:



1 Τοποθετήστε τη μαγνητική βάση με την κάμερα σε μια επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία κλίσης.

2 Για να δείτε με την προοπτική πουλιού την κούνια ή ολόκληρο το δωμάτιο, χρησιμοποιήστε τη βάση ως βάση τοίχου και στερεώστε την κάμερα στον τοίχο πάνω από την κούνια.

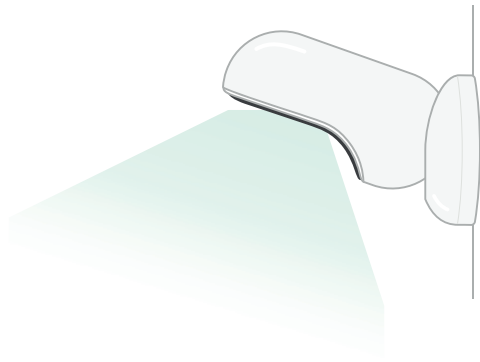

Οι επόμενες οδηγίες θα σας οδηγήσουν στην τοποθέτηση της κάμερας στον τοίχο πάνω από την κούνια.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης, το οποίο θα βρείτε στον ιστότοπο support.owlletcare.com.

Τι περιέχει η συσκευασία



Κάμερα Owlet Cam



Μαγνητική βάση




Καλώδια με λουρίδες Owlet*
και αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου




Προσαρμογέας τροφοδοσίας

Σετ τοποθέτησης της κάμερας στον τοίχο

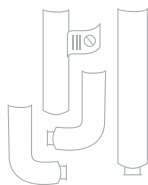

21x προστατευτικό
καλωδίων
18x μακρύ
προστατευτικό
1x καπάκι άκρου
2x προστατευτικό
καλωδίων σε σχήμα L

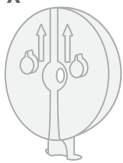

Πλάκα
τοποθέτησης



1x βίδα

Εργαλεία που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση της κάμερας




Μέτρο
(δεν περιλαμβάνεται στην
συσκευασία)



Μικρό κατσαβίδι Phillips
(δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)

*Τα προηγούμενα μοντέλα μπορεί να περιλαμβάνουν έναν οργανωτή καλωδίων.

1. Μετρήστε και σημειώστε τις κατάλληλες αποστάσεις

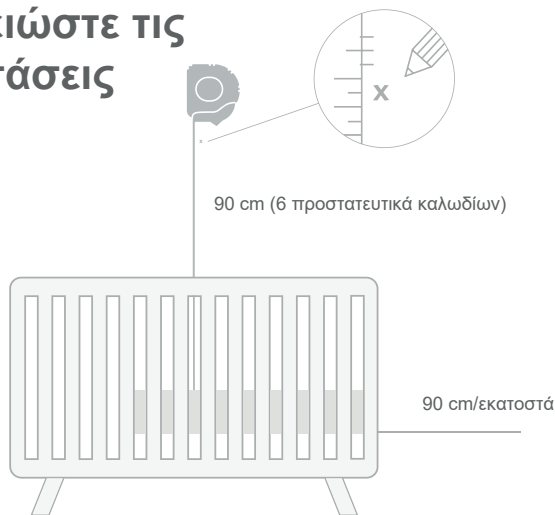


Μετρήστε 90 cm από το πάνω μέρος του στρώματος του παιδιού και σημειώστε το σημείο στον τοίχο που θα τοποθετηθεί η κάμερα. Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το κέντρο της κούνιας, ώστε να διασφαλίζεται η ιδανική γωνία θέασης για την κάμερα.

Μελετήστε ποια πρίζα θα χρησιμοποιήσετε. Η πρίζα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 90 cm από την κούνια, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια στην εμβέλεια του παιδιού. Στις επόμενες οδηγίες θα μάθετε πώς να καλύπτετε όλα τα καλώδια.

Η θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας είναι επίσης σημαντική. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται στο άκρο του καλωδίου στην πλευρά που συνδέεται με το τροφοδοτικό.

2. Ευθυγραμμίστε και στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης

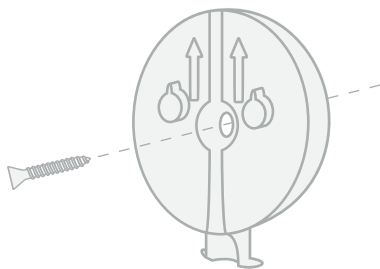


Ευθυγραμμίστε την οπή στο κέντρο της πλάκας τοποθέτησης με το σημάδι που έχετε χαραξίσει στον τοίχο. Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα, στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο με τα βέλη προς τα πάνω.

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο



Αφαιρέστε τους δεσμούς καλωδίων και ξετυλίξτε το καλώδιο.

4. Περάστε το καλώδιο μέσα

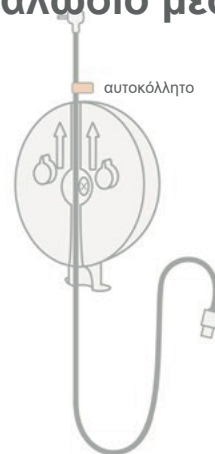


Περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή της πλάκας τοποθέτησης και ευθυγραμμίστε το πορτοκαλί αυτοκόλλητο που υπάρχει στο καλώδιο με το επάνω μέρος της πλάκας τοποθέτησης.

5. Τοποθετήστε την βάση



Τοποθετήστε τις μεγάλες οπές της μαγνητικής βάσης πάνω στις γλωπίδες της πλάκας τοποθέτησης και σύρετε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

6. Τοποθετήστε την κάμερα

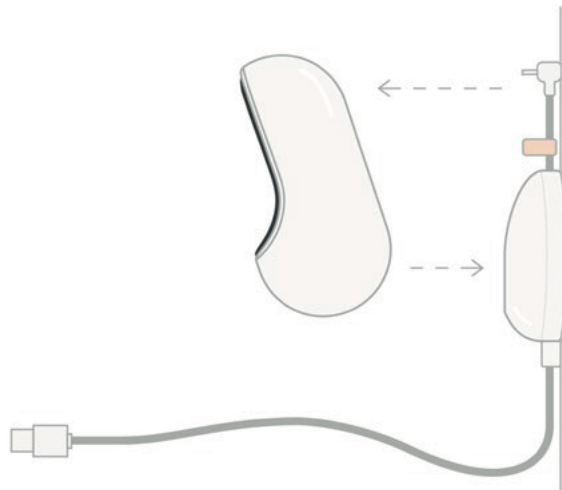


Τοποθετήστε την κάμερα στη μαγνητική βάση. Συνδέστε το καλώδιο με την κάμερα..

Το πορτοκαλί αυτοκόλλητο θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από την πλάκα τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση του καλωδίου για τη ρύθμιση της κάμερας στην επιθυμητή γωνία.

7. Εγκαταστήστε τα προστατευτικά καλώδια

Τα προστατευτικά καλωδίων επικολλούνται στον τοίχο με χρήση κόλλας υψηλής αντοχής. Μην βιάζεστε κατά την εγκατάσταση και επιλέξτε προσεκτικά τη σωστή θέση.


- 1 Αποκολλήστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη από το πίσω μέρος του μακρού προστατευτικού.
- 2 Περάστε το καλώδιο μέσα από το κέντρο του μεγάλου προστατευτικού.
- 3 Κουμπώστε το μακρύ προστατευτικό στο κάτω μέρος της πλάκας στερέωσης.
- 4 Πιέστε το γερά στον τοίχο.
- 5 Επαναλάβετε τις ενέργειες 1-4 με τα υπόλοιπα μακριά προστατευτικά και καλύψτε όλο το μήκος του καλωδίου μέχρι την πρίζα.

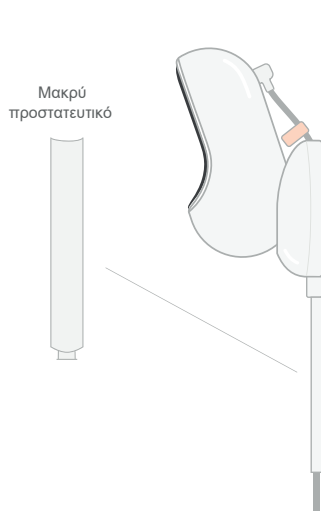

8. Προστατευτικό καλωδίων σε σχήμα L

Χρησιμοποιήστε το δεξί ή το αριστερό προστατευτικό καλωδίου σχήματος L για να κατευθύνετε το καλώδιο προς την πρίζα.

Τοποθετήστε και άλλα μακριά προστατευτικά μέχρι να καλυφθούν όλα τα καλώδια σε απόσταση 90 cm από την άκρη της κούνιας. Προσθέστε μακριά προστατευτικά και καλύψτε το καλώδιο μέχρι την πρίζα. Μόλις απομακρυνθείτε 15-25 cm από την πρίζα, τοποθετήστε το βύσμα (στη συνέχεια θα μπορείτε εύκολα να δέσετε το περιπτό καλώδιο με ταινία Velcro).

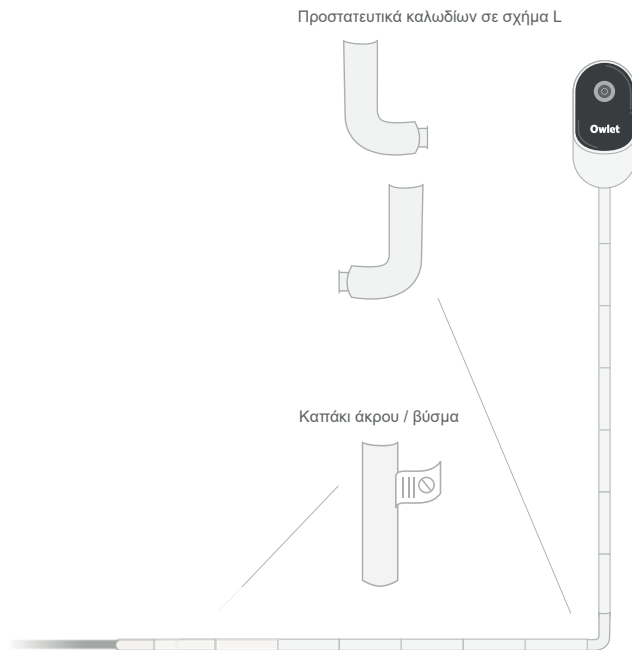


9. Ασφαλίστε το πλεονάζον καλώδιο με ταινία Velcro

Τυλίξτε το πλεονάζον καλώδιο σε μια χαλαρή θηλιά. Περάστε το λουρί του καλωδίου μέσα από την πρώτη οπή για να στερεώσετε το πάνω μέρος του βρόχου. Το λογότυπο της Owllet πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς τα έξω. Περάστε το λουρί του καλωδίου μέσα από τη δεύτερη οπή για να συνδέσετε το κάτω μέρος του βρόχου με το πάνω μέρος (ο βρόχος θα πρέπει τώρα να θυμίζει ένα φιόγκο). Ασφαλίστε το υπόλοιπο τμήμα της λωρίδας.

Αφού τυλίξετε σωστά το πλεονάζον καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα.


Έτοιμο! Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας μέχρι να πετύχετε τη λήψη που θέλετε.

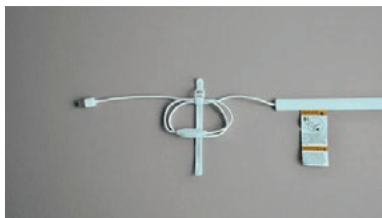

Χρειάζεστε συμβουλές;

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας μπορείτε να τα βρείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση:

www.owlletcare.gr

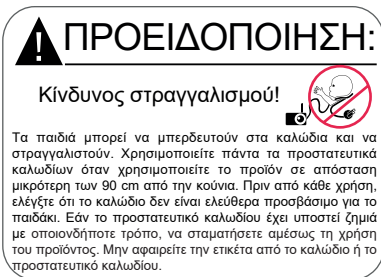

ΕΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΣΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η κάμερα Owlet Cam δεν είναι ιατρική συσκευή. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συσκευή ή να αντικαταστήσει μια ιατρική συσκευή. Δεν χρησιμοποιείται και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετρισμό ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας και ιατρικής κατάστασης. Ούτε προορίζεται να διερευνήσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την ανατομία ή οποιαδήποτε φυσιολογική διαδικασία.
- Μόνο για εσωτερική χρήση. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό και υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη κάμερα κοντά σε νερό (π.χ. μπανιέρα, νεροχύτης κ.λπ.) και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Η χρήση της κάμερας δεν πρέπει να αντικαθιστά την κατάλληλη επίβλεψη από ενήλικες/γονείς. Ελέγχετε το μωρό σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η κάμερα δεν θα σας ειδοποιήσει για σιωπηλή δραστηριότητα του μωρού.
- ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αποσυρμολογήσετε το προϊόν. Διατρέχετε τον κίνδυνο και η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να επιχειρήσει να συντηρήσει ή να επισκευάσει τη κάμερα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η λανθασμένη πολικότητα ή τάση του προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε το μπερδέμα και την υπερθέρμανση, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
- Ο προσαρμογέας μπορεί να είναι λίγο ζεστός στην αφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Ελέγξτε ότι τα καλώδια της πρίζας στον τοίχο δεν είναι ασυνήθιστα ζεστά στην αφή.

- Ελέγξτε ότι τα καλώδια της πρίζας δεν είναι ασυνήθιστα ζεστά στην αφή. Εάν είναι ζεστά στην αφή αποσυνδέστε αμέσως τα καλώδια από αυτές τις πρίζες. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις πριζών είναι σε καλή κατάσταση για να διασφαλίσετε ότι ο προσαρμογέας δεν είναι χαλαρός ή ότι τα καλώδια δεν είναι εκτεθειμένα. Ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τον προσαρμογέα / βύσμα κάτω από παράθυρο όπου ένα παιδί θα μπορούσε να πατήσει πάνω του και/ή να φτάσει σε ένα δυνητικά επικίνδυνο μέρος της εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο από ενήλικες. Κρατήστε τα μικρά μέρη του προϊόντος μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Η κάμερα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη μετάδοση σε συχνότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η FCC. Ασφαλίστε πάντα το ρούτερ Wi-Fi με κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ:** ΜΗΝ μπλοκάρτε τους αεραγωγούς του προϊόντος. ΜΗΝ το τοποθετείτε σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί και παρμόριες επιφάνειες. ΜΗΝ τον τοποθετείτε σε βιβλιοθήκη και ράφι ή πάνω σε ντουλάπα ώστε να μην περιοριστεί η ροή του αέρα.
- **ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:** Η κάμερα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θέρμανσης, όπως τα calorifer, οι θερμάστρες, οι σόμπες και άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Επίσης, κρατήστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:** Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην μπορεί να πατηθεί ή να πιαστεί από διάφορα αντικείμενα. Προσέξτε ιδιαίτερα το τμήμα του καλωδίου κοντά στο βύσμα και το σημείο όπου εξέρχεται από τη κάμερα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εταιρεία Owlet είναι περήφανη για τα προϊόντα της. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις μας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.owletcare.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ FCC

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια

για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΗΗΕ

Η εταιρεία Owlet δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των προϊόντων της Owlet εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρεία Owlet Baby Care δηλώνει ότι η κάμερα Owlet Cam συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: www.owletcare.gr.

ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
2.412-2.472 MHz (ισχύς εξόδου 0,0249 W)

Αυτή η συσκευή πληροί το μέρος 15 κανόνων της FCC και συμμορφώνεται με μη αδειοδοτημένες καναδικές RSS χωρίς εξάρτηση για την κανοντομία, την επίσημη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή δεν πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Αμερικανικές πατέντες ευρεσιτεχνίας
αριθ. D864147 και D864148.
Άλλες πατέντες εκκρεμούν.

Κατασκευασμένο στην Κίνα.



Πληροφορίες για περιορισμένη εγγύηση και αποποίηση ευθύνης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Owlet εγγυάται ότι οι Κάμερα Owlet Cam από την Owlet θα είναι υπό κανονική χρήση και συντήρηση απαλλαγμένη από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για χρονικό διάστημα ενός (2) έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, όπως αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση παρέχεται μόνο στον πραγματικό αγοραστή αυτής της Κάμερα Owlet Cam από την Owlet.

Πληροφορίες Ασφάλειας

Η Κάμερα Owlet Cam της Owlet και η εφαρμογή Owlet προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα φροντίδας του παιδιού και δεν προορίζονται να αντικαθιστούν ή να χρησιμοποιούνται χωρίς την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενηλίκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πολλές χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση και συντήρηση της Κάμερα Owlet Cam της Owlet. Για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν διαβάσετε πρώτα τις συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορεί να μην χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή σελίδα www.owletcare.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων προσώπων είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο και στην εφαρμογή Owlet Baby Care υπάρχουν πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε και ακολουθήστε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλες επιπτώσεις εκτός από τραυματισμό ατόμων, π.χ. ζημιά σε αγαθά.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα προειδοποιητικό σύμβολο και τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ", "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ", "ΠΡΟΣΟΧΗ" ή "ΠΡΟΣΟΧΗ". Οι λέξεις αυτές σημαίνουν:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων/ή ζημιά σε αγαθά.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέπειες εκτός από σωματικές βλάβες, π.χ. υλικές ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Κάμερα **Owlet Cam** δεν είναι ιατρική συσκευή. Η κλίση Cam της Owlet σας ειδοποιεί όταν ο καρδιακός παλμός ή το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του παιδιού σας είναι εκτός ενός καθορισμένου πλάσιου. Η Κάμερα **Owlet Cam** της Owlet προορίζεται για νεογέννητα έως δεκαεπτά (18) μηνών και όχι για παιδιά άνω των δεκαεπτά (18) μηνών. Η Κάμερα **Owlet Cam** δεν είναι ιατρικό προϊόν. Κάμερα **Owlet Cam**.

- Δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετρισμό, την παρακολούθηση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή άλλου τραυματισμού.
- Δεν επιπρεάζει τη λειτουργία ή τη δομή του σώματος.
- Δεν επιπυχνάνει τους βασικούς επιδικωκόμενους σκοπούς της με την επίδραση χημικών ουσιών.
- Δεν αποτρέπει το σύνδρομο ακριθιδίου βρεφικού θανάτου (ΣΑΘΒ).

Ο κύριος σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι τα εξής: Παροχή βασικών οδηγιών και συστάσεων προς τον χρήστη για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση της Κάμερα **Owlet Cam** της Owlet και περιγραφή των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, των ασφαλιστικών μέτρων, της συντήρησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων της Κάμερα **Owlet Cam** της Owlet. Είναι πολύ σημαντικό για όλα τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν ή θα ρυθμίσουν αυτή την Κάμερα **Owlet Cam** να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά την Κάμερα **Owlet Cam** της Owlet και να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες.

Εάν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω του email: owletcare.gr@certus-mercatus.com.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



- **ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΟ.**
- Η Κάμερα **Owlet Cam** ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΛΑ ΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
- ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΡΑ ΜΟΡΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΦΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ CAM ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET.
- ΟΠΟΤΕ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ FCC



Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με μη αδειοδοτημένες καναδικές RSS χωρίς εξαίρεση για την κανινομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Επίλυση προβλημάτων

Αρχικές ρυθμίσεις | Συναγερμοί | Σύνδεση

Αρχικές ρυθμίσεις

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν μπορώ να δω το δίκτυο Wi-Fi κατά την εγκατάσταση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν είναι ενεργοποιημένη.■ Η βάση είναι ήδη συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.■ Η βάση είναι εκτός εμβέλειας.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε τη βάση στην πρίζα.■ Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία δικτύου Wi-Fi στο κάτω μέρος της βάσης είναι αναμμένη. Σε περίπτωση που είναι αναμμένη, παραλείψτε αυτό το βήμα και συνεχίστε με τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.■ Τοποθετήστε τη βάση πλησιέστερα στο ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν βλέπω το οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi στην εφαρμογή Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Το ρούτερ σας χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνότητων 5 GHz (η συσκευή της Owlet υποστηρίζει μόνο τη ζώνη συχνότητων 2,4 GHz).■ Ενδεχομένως να έχετε κρυφό ρούτερ.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 2,4GHz (τα περισσότερα ρούτερ των 5GHz υποστηρίζουν επίσης δίκτυο 2,4GHz).■ Για οδηγίες σχετικά με τα κρυφά ρούτερ, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none">■ Λάθος κωδικός πρόσβασης■ Η βάση βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi σας.■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυό σας.■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στο ρούτερ πριν από τη ρύθμιση και όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση τοποθετήστε τη βάση στο δωμάτιο του παιδιού.■ Δοκιμάστε να κάνετε επανεικκίνηση του τηλεφώνου σας και να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi.■ Επισκεφτείτε το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση ανάβει με άσπρο χρώμα όταν η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι αποσυνδεδεμένη.	<ul style="list-style-type: none">■ Ενημέρωση λογισμικού σε εξέλιξη.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock ξανά στη βάση μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί με το λογαριασμό μου Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Κρατήστε πατημένο το μικρό πλήκτρο καταχώρησης/Εγγραφή	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Πατήστε και αφήστε (μην κρατάτε πατημένο) το μικρό κουμπι Εγγραφή στο κάτω μέρος της βάσης και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά με το λογαριασμό σας Owlet.■ Συνδέστε τη συσκευή iOS στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz στο οποίο είναι συνδεδεμένη η βάση.

*Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο owletcare.gr@certus-mercatus.com

Συναγερμοί

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με μπλε χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση της ξύπνης κάλτσας Smart Sock είναι εκτός εμβέλειας. ■ Το σώμα του γονα ή άλλου ατόμου που φροντίζει το μωρό εμποδίζει τη σύνδεση μεταξύ της ξύπνης κάλτσας και της βάσης. ■ Χαμηλή ή νεκρή μπαταρία 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στην ξύπνη κάλτσα Smart Sock. ■ Αλλάξτε τη θέση του μωρού ή σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε το μόνιτο κατά το τάξιμα, την αλλαγή πάνα, την αγκαλιά κ.λπ. ■ Φορίστε την ξύπνη κάλτσα Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με κόκκινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Χαμηλός ή υψηλός καρδιακός παλμός ■ Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ■ Η ξύπνη κάλτσα δεν εφαρμόζει στο πόδι. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η ξύπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα. ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα τμήματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια υφασμάτινη κάλτσα με διαφορετικό μέγεθος.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με κίτρινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προβλήματα με την απόκτηση δεδομένων ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Το φως στο δωμάτιο είναι πολύ έντονο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η ξύπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα και μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει έναν συναγερμό χωρίς λόγο). ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα ανολίγματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Χαμηλώστε τα φώτα στο δωμάτιο.

Σύνδεση

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση βρίσκεται εκτός εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi. ■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση και το ρούτερ Wi-Fi πιο κοντά μεταξύ τους (ενισχυτές Wi-Fi και άλλα ρούτερ δεν θα λύσουν το πρόβλημα). ■ Επικοινωνήστε με το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν φορτίζει. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν είναι πλήρως ενεργοποιημένη. ■ Η ξύπνη κάλτσα απαιτεί επαφή. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφήστε την ξύπνη κάλτσα Smart Sock να φορτίσει μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να αναβοβλίνει πράσινη ένδειξη. ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρονικό εξάρτημα της ξύπνης κάλτσας Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Οι παύλες είναι ορατές αντί των ενδείξεων του καρδιακού παλμού και του επιπέδου οξυγόνου. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock προσπαθεί να πάρει μια αβέβαιη ένδειξη. ■ Το μωρό κουνάει πολύ το πόδι του. ■ Ακατάλληλη τοποθέτηση της ξύπνης κάλτσας Smart Sock ■ Ακατάλληλη εφαρμογή της υφασμάτινης κάλτσας 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στο κέντρο των τμημάτων της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Μην βάζετε το μωρό σας στην κούνια ή στα μαξιλαράκια δόνησης, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα Smart Sock έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέγεθος της υφασμάτινης κάλτσας.

Συμβουλές για ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές συμβουλές για το πώς να εξασφαλίσετε έναν υγιή και ασφαλή ύπνο για το μωρό σας.

- Το μωρό πρέπει να είναι μόνο του στο κρεβατάκι και να είναι ξαπλωμένο ανάσκελα. Ο ύπνος στο πλάι ή μπρούμυτα δεν είναι ασφαλής για τα μωρά.
- Προμηθευτείτε μια κούνια για το μωρό σας που πληροί τα τρέχοντα κριτήρια ασφαλείας. Επίσης αγοράστε ένα σταθερό στρώμα που να ταιριάζει καλά στην κούνια και καλύπτε το με ένα καλά προσαρμοσμένο σεντόνι.
- Μην τοποθετείτε μαλακά, χαλαρά και χνουδωτά αντικείμενα στην κούνια. Περιλαμβάνονται μαξιλάρια, κουβέρτες, παπλώματα, επενδύσεις βρεφικών κρεβατιών, λούτρινα ζώακια, παιχνίδια και οποιαδήποτε άλλα μαλακά αντικείμενα.
- Αντί για μια παραδοσιακή κουβέρτα, χρησιμοποιήστε μια βρεφική κουβέρτα που μπορεί να κουμπώσει όπως ένα ρούχο ή μια παρόμοια κουβέρτα που θα κρατήσει το μωρό σας ζεστό και ασφαλές.
- Μοιραστείτε ένα δωμάτιο με το μωρό σας, αλλά όχι ένα κρεβάτι. Το μωρό σας θα πρέπει να κοιμάται σε ξεχωριστό κρεβατάκι κοντά στο κρεβάτι σας. Θα το κρατήσει ασφαλές και θα διευκολύνει το τάισμα. Εάν το μωρό κοιμάται μαζί σας, η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν θα λειτουργεί σωστά. Το σώμα σας θα μπορούσε να παρεμποδίσει το ασύρματο σήμα της κάλτσας.
- Μην κοιμάστε με το μωρό στο κρεβάτι σας, στον καναπέ ή σε μια καρέκλα.
- Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας να κοιμάται σε μαλακές επιφάνειες, όπως είναι τα κρεβάτια ενηλίκων ή παιδιών, οι καναπέδες, οι καρέκλες, τα στρώματα νερού, τα μαξιλάρια, τα μαξιλαράκια, οι κουβέρτες, τα δέρματα από πρόβατα και παρόμοια αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε μαξιλάρια, πλατφόρμες τοποθέτησης και μαξιλάρια στερέωσης για να στηρίξετε το μωρό, να το κρατήσετε ή να το αποτρέψετε από το να γυρίσει.
- Φροντίστε ώστε το μωρό να μην ζεσταθεί υπερβολικά. Φορέστε του ελαφριές πιτζάμες και διατηρήστε στο δωμάτιο μια θερμοκρασία που να είναι άνετη για έναν ελαφρά ντυμένο ενήλικα.
- Σκεφτείτε πριν προσφέρετε στο μωρό σας πιπίλα κατά τη διάρκεια του απογευματινού και του βραδινού ύπνου. Να προσφέρετε στα μωρά πιπίλα σε ηλικία 3-4 εβδομάδων, όταν έχουν συνηθίσει το θηλασμό.
- Ενημερώστε όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν το μωρό σας για αυτές τις αρχές για ασφαλές ύπνο!



Δήλωση συμμόρφωσης Owlet

Κατασκευαστής: Owlet Baby Care

Προϊόν: Κάμερα Owlet

Αριθμός μοντέλου: OC1B

Περιγραφή προϊόντος: Ο πρωταρχικός σκοπός της κάμερας Owlet είναι να σας επιτρέψει να παρακολουθείτε και να ακούτε το μωρό σας. Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κάμερα υψηλής ευκρίνειας με ευρυγώνιο φακό και υλικολογισμικό ικανό να παρακολουθεί αν υπάρχει κίνηση ή όχι, μικρόφωνο και υλικολογισμικό με δυνατότητα παρακολούθησης εάν υπάρχει ή όχι ήχος, ηχείο, αισθητήρα φωτός και υλικολογισμικό ικανό να ρυθμίζει την κάμερα μεταξύ υπέρυθρης και κανονικής προβολής, ανάλογα με το διαθέσιμο φως του περιβάλλοντος, ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που επιτρέπει στην κάμερα να μεταδίδει τη θερμοκρασία του δωματίου και ένα τροφοδοτικό. Η μονάδα περιλαμβάνει επίσης μαγνητική βάση (βάση στήριξης) για την κάμερα που επιτρέπει στη φωτογραφική μηχανή να ρυθμίζεται φυσικά, ώστε να βλέπει προς την επιθυμητή κατεύθυνση και στην επιθυμητή γωνία, μια βάση τοίχου και μια βίδα για την τοποθέτηση της κάμερας, προστατευτικά καλωδίων για την προστασία του καλωδίου από πρόσβαση στο μωρό εάν η κάμερα είναι τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την κούνια και ένα κουτί καλωδίου για την αποθήκευση τυχόν καλωδίου που περισεύει.

Όνομα Αντιπροσώπου: Obelis S.A

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου εκπροσώπου: Λεωφόρος Général Wahis
53, B-1030 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Τηλ: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03

Email: mail@obelis.net

Εκπρόσωπος: κ. Γεδεών ΕΛΚΑΥΑΜ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει, εκ μέρους της Owlet Baby Care of Lehi, Utah, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη

της Owlet Baby είναι σύμφωνο με τις διατάξεις:

- Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Συμβουλίου (16 Απριλίου 2014) – Ραδιοεξοπλισμός
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Χαμηλή τάση
- Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Συμβουλίου (08 Ιουνίου 2011) – Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών
- Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου (03 Δεκεμβρίου 2001) – Γενική ασφάλεια προϊόντων
- Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Συμβουλίου (04 Ιουλίου 2012) – Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο Τεχνικός Φάκελος που απαιτείται από την παρούσα Οδηγία τηρείται στα κεντρικά γραφεία της Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Λέχι, Γιούτα.

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2021

Tammy Lavery

Tammy Lavery

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs