

Για ποιο προϊόν προορίζεται αυτό το εγχειρίδιο χρήσης;

Έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3

Έξυπνη κάλτσα Smart Sock Plus

Τι περιέχει η συσκευασία

Κάλτσες σε μεγέθη 1, 2 και 3, για κάθε μέγεθος ποδιού, κάλτσα για το δεξί και το αριστερό πόδι,

αισθητήρα της έξυπνης κάλτσας Smart Sock,

Βάση,

Καλώδιο βάσης,

προσαρμογέα τροφοδοσίας.

Οδηγός έναρξης:

*Οι κάλτσες στο μέγεθος 3 περιλαμβάνονται μόνο στην συσκευασία Smart Sock Plus.

Πώς λειτουργεί η έξυπνη κάλτσα της Owlet;



Ο αισθητήρας της έξυπνης κάλτσας Smart Sock χρησιμοποιεί παλμική οξυμετρία για να συγκεντρώσει τα δεδομένα από το πόδι του μωρού σας που κοιμάται. Το φως της κάλτσας διαπερνά το δέρμα και η ροή του αίματος και τα επίπεδα οξυγόνου υπολογίζονται με βάση το πόσο φως ανιχνεύει ο αισθητήρας.

Ο αισθητήρας της έξυπνης κάλτσας Smart Sock συγκεντρώνει δεδομένα και τα μεταδίδει στη βάση. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η βάση θα σας ειδοποιήσει όταν είναι ανάγκη. Η βάση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας ειδοποιεί εγκαίρως σε περίπτωση εμφάνισης κόκκινου συναγερμού, επομένως σας συνιστούμε να την τοποθετήσετε σε σημείο που να την ακούτε πάντα.


Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Σε περίπτωση που η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο Wi-Fi:

Η βάση μεταδίδει πληροφορίες στο Cloud της Owlet μέσω του δικτύου Wi-Fi. Το Cloud της Owlet σας επιτρέπει να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στην εφαρμογή Owlet. Επομένως, μπορείτε να βλέπετε όλα τα δεδομένα σας σε πραγματικό χρόνο και να δέχεστε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή όπου κι αν βρίσκεστε.

Λειτουργία LAN (τοπικό δίκτυο):

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LAN, το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη βάση. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί το δίκτυο Wi-Fi για να δημιουργήσει μια αρχική σύνδεση με το cloud της Owlet και να δέχεται τα δεδομένα μέχρι να κλείσετε την εφαρμογή και να γίνει αλλαγή του δικτύου Wi-Fi της εφαρμογής ή της βάσης.

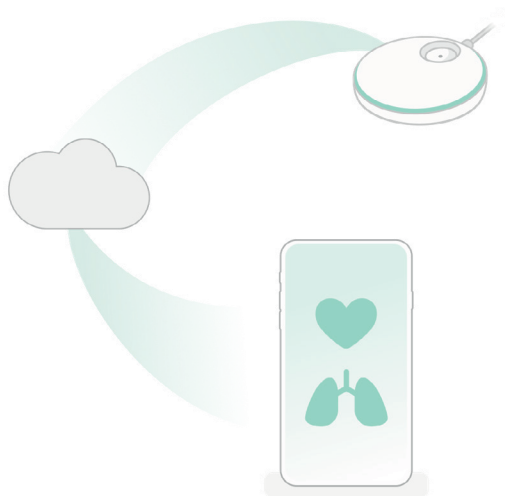

Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock από την Owlet.

Προδιαγραφές/Απαιτήσεις

Η έξυπνη κάλτσα της Owlet απαιτεί πρόσβαση σε μια συσκευή iOS ή Android που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή Owlet Care. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στο κατάστημα των εφαρμογών.

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock Plus είναι κατάλληλη για παιδιά με μέγιστο βάρος 24,9 kg (55 lbs).

Οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η απομακρυσμένη πρόσβαση στην εφαρμογή και ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής απαιτούν σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz. Τα δίκτυα Wi-Fi hotspot και το δίκτυο 5GHz δεν υποστηρίζονται.

Για να ρυθμίσετε την έξυπνη κάλτσα της Owlet:

① Κατεβάστε την εφαρμογή Owlet.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές iOS όσο και για συσκευές Android.



② Δημιουργήστε λογαριασμό:

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.



Hi there! Let's make you an account.

Email

Password (+6 characters long)

Re-enter Password



'Hoo' are you?

First Name

Last Name

Phone

Your Birthday

Zip



An email with a confirmation code has just been sent to you.

Resend email



Your account has been confirmed. Welcome to the Owlet family!

To home >

Add a child profile or device

Get started



Learn more about the Owlet Smart Sock >



Do you have an Owlet device to set up?

No >

Yes >

Which device would you like to set up?



Smart Sock 3



Smart Sock 2




Cam




③ Ρυθμίστε τη συσκευή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Owlet και προσθέσετε περισσότερες συσκευές Owlet, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να προσθέσετε μια νέα συσκευή.

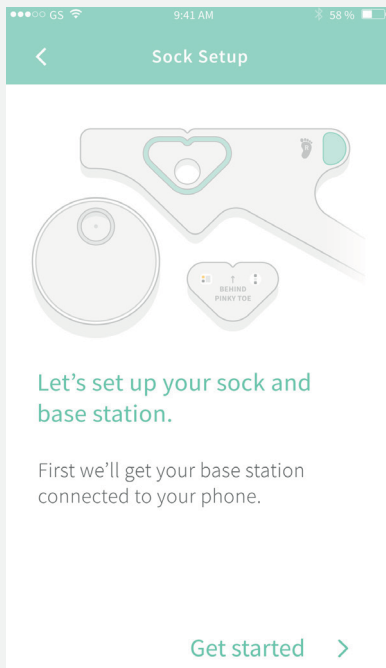


④ Συνδέστε τη βάση με την παροχή τροφοδοσίας και την έξυπνη κάλτσα Smart Sock στη βάση.

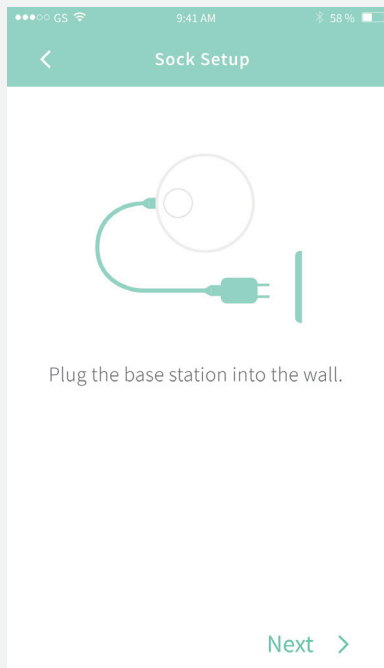


Let's connect your base station to Wi-Fi, so you can see readings on your phone.

1. Go to your phone's Wi-Fi settings and select the "Owlet" network

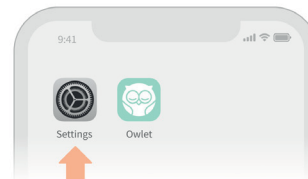

2. Come back to the Owlet App

If you are redirected or see a "failed to redirect" message, that's okay! Just come back to the Owlet app.

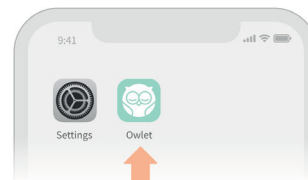

(Αυτή η οθόνη προορίζεται μόνο για τις συσκευές iOS.)



Your account has been confirmed. Welcome to the Owlet family!

[To home >](#)

(Αυτή η οθόνη είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android.)

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδέσετε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock στο

Wi-Fi Setup

Select the Owlet device you want to set up.

 Owlet - 383G9f65

(Αυτή η οθόνη είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android.)

δίκτυο Wi-Fi, να καταχωρήσετε και να αντιστοιχίσετε την κάλτσα και να

Wifi Setup

Select Wi-Fi router

(Does not work with 5.0GHz networks yet.)

 JohnsonFamilyWifi

 Your Neighbors Weird Wifi Name

 Jurassic House

 The Petersons

αναβαθμίσετε την κάλτσα, εφόσον χρειάζεται.

Wifi Setup

Enter the Wi-Fi Password for JohnsonFamilyWifi

Password

Connect

Wifi Setup



One sec,
connecting to Wi-Fi...

Wifi Setup



Looks like the Wi-Fi is
connected and ready to go!

Next, we'll get your device registered.

Next >




Quick check

Check the status of the Wi-Fi on the back of the base station.



The Wi-Fi light is off >

The Wi-Fi light is on >

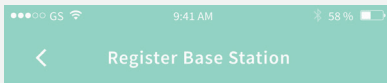


Click and hold down on the base station (until you hear 2 beeps)

It can take up to 10 seconds to register after pushing the button.

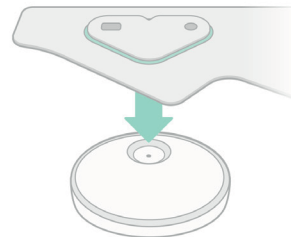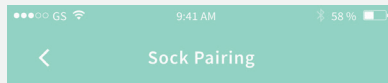

Registration successful!


Insert the sock into the base station

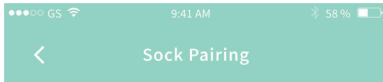

The sock has successfully paired!


Your base station should now be pulsing white, indicating that your sock is charging.

Next we'll make sure your device is up to date.

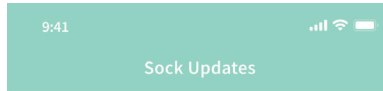

Updating your Owlet Sock 3

Please don't unplug your base station while it's updating.

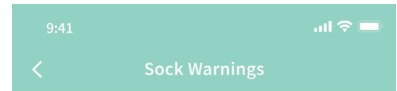

Important Safety Information

Correct sock fit

Your baby's safety is our top priority and we know it's yours too.

We want you to be aware that incorrect use of the sock could result in discomfort, potentially leading to red marks, pressure sores, or blisters on your baby's foot. Keep your baby's foot dry, and use the correct sock size and follow our placement guidelines.




Sock Hygiene

Gently hand wash the sock and sensor at least once every week with a mild detergent. Wait until the sock is completely dry before continuing use.

Safe sleep practices

Remember to always practice safe sleep practices and avoid unsafe sleep surfaces including swings, car seats and co-sleeping.

The Owlet Sock is not a replacement for safe sleep and parental care. Please ensure you are following safe sleep guidelines and are using the Owlet Sock as an aid to know how your baby is doing in addition to all the care, safety and love they receive from you.

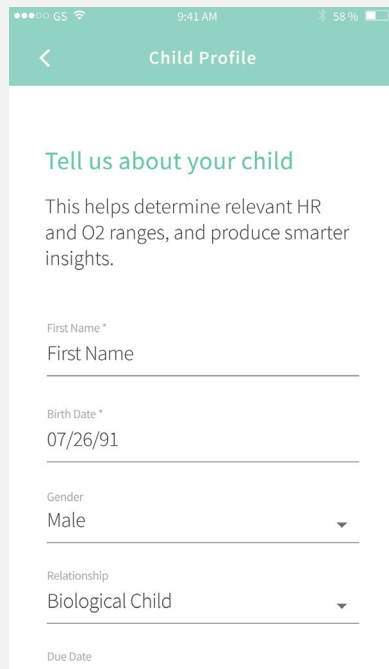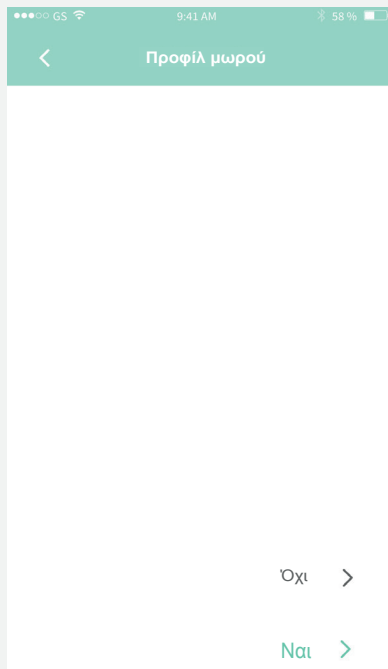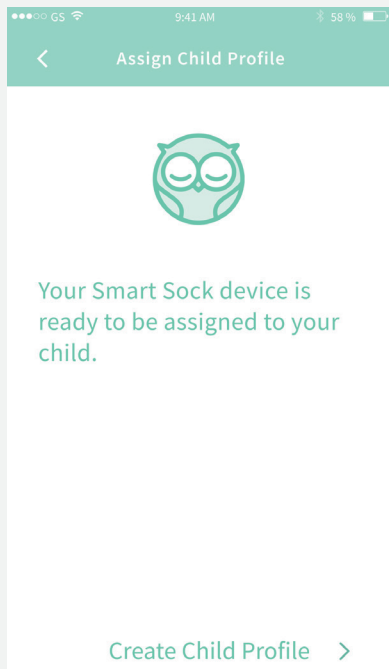

⑤ Δημιουργήστε το προφίλ του μωρού σας. Η εφαρμογή σας βοηθά να δημιουργήσετε το προφίλ του μωρού σας και να το αντιστοιχίσετε σε μια συσκευή Owlet.

< Child Profile



Add a picture of Aaron

Or, do it later from the home screen if you'd rather.


Το σωστό μέγεθος της έξυπνης κάλτσας Smart Sock και πώς να τη φορέσετε

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι διαθέσιμη σε δύο μεγέθη και υπάρχει μια κάλτσα για το δεξί και το αριστερό πόδι σε κάθε μέγεθος:

Το μέγεθος 1 είναι κατάλληλο για μωρά που ζυγίζουν έως 5,4 kg (12 lbs).

Το μέγεθος 2 είναι κατάλληλο για μωρά που ζυγίζουν από 5,4-13,5 kg (12-30 lbs).

Το μέγεθος 3 είναι κατάλληλο για παιδιά που ζυγίζουν από 13,5 έως 24,9 kg (30-55 lbs).*

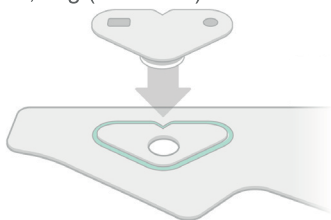

*Οι κάλτσες στο μέγεθος 3 περιλαμβάνονται μόνο στη συσκευασία Smart Sock Plus.



Συνδέστε τον αισθητήρα με την υφασμάτινη κάλτσα

Ευθυγραμμίστε το περίγραμμα του αισθητήρα με τη γραμμή στο ύφασμα, πιέστε τον αισθητήρα πάνω στην κάλτσα για να τον στερεώσετε και κουμπώστε τον στη θέση του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Αν δεν είστε σίγουροι για το κατάλληλο μέγεθος, ξεκινήστε με μια μικρότερη κάλτσα.



Φορέστε την κάλτσα

Τοποθετήστε την κάλτσα στο πλάι του ποδιού έτσι ώστε ο αισθητήρας να βρίσκεται πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού.

Στερεώστε το λουράκι κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών και, στη συνέχεια, τυλίξτε το λουράκι του



αστραγάλου γύρω από το πίσω μέρος του αστραγάλου και στερεώστε το στο άνω του ποδός.

Όταν τοποθετηθεί σωστά, η λωρίδα στο πάνω μέρος του ποδιού πρέπει να δείχνει προς τον αντίχειρα και ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται στην άκρη του μικρού δακτύλου του ποδιού του μωρού, έτσι ώστε το κεφάλι της κουκουβάγιας να δείχνει προς τα δάχτυλα των ποδιών.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ SMART SOCK 3 ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πολύ πιο κινητικά και δραστήρια από τα μωρά, γι' αυτό θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές χρήσιμες συμβουλές:

1. Φορέστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock στο μωρό σας αφού το βάλετε για ύπνο, ώστε να κυκλοφορεί με την κάλτσα αυτή όσο το δυνατόν λιγότερο. Το περπάτημα με την κάλτσα μπορεί να βλάψει τον αισθητήρα.
2. Να περιμένετε ώσπου να κοιμηθεί το παιδί και μετά να ενεργοποιήσετε τη βάση. Αυτό αποτρέπει τους κίτρινους συναγερμούς που μπορούν να σας ειδοποιήσουν ανώφελα όταν το μωρό σας στριφογυρίζει ενώ πρόκειται να κοιμηθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη βάση μέσω της εφαρμογής ή απευθείας στη μονάδα.
3. Εάν το παιδί σας δεν έχει ξαναφορέσει ποτέ την έξυπνη κάλτσα Smart Sock, μπορεί να διστάζει και να σας κάνει ερωτήσεις. Αφήστε το παιδί σας να δει τη συσκευή και να τη συνηθίσει προτού να φορέσει την κάλτσα.

Συγκέντρωση δεδομένων και ειδοποιήσεις

Προτού το παιδί σας αποκοιμηθεί ή πάει για ύπνο, αφαιρέστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock από την βάση και φορέστε την στο παιδί σας.

Οι ενδεικτικές λυχνίες της βάσης θα αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή προσπαθεί να λάβει τις μετρήσεις. Η βάση θα παράγει παλμούς με πράσινο χρώμα όταν αρχίσει να λαμβάνει τα δεδομένα.

Κίτρινος συναγερμός

Κατά τη διάρκεια του κίτρινου συναγερμού, ο σταθμός βάσης θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα, θα αναπαράγει ένα ναούρισμα και η εφαρμογή θα σας στείλει μια ειδοποίηση με ένα push. Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει ότι η κάλτσα έχει τοποθετηθεί λάθος ή έχει πέσει από το πόδι του παιδιού και η συσκευή δεν μπορεί να καταγράψει σωστά στοιχεία για 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Μπλε συναγερμός

Κατά τη διάρκεια του μπλέ συναγερμού, ο σταθμός βάσης θα αναβοσβήνει με μπλέ χρώμα, θα αναπαράγει ένα ναούρισμα και η εφαρμογή θα σας στείλει μια ειδοποίηση με ένα push. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει ότι η κάλτσα βρίσκεται εκτός εμβέλειας της βάσης για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, προειδοποιώντας για χαμηλή μπαταρία ή μπλοκάρισμα του σήματος.

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επηρεάσει το σήμα μεταξύ της βάσης και της κάλτσας. Όταν κρατάτε το μωρό, μην γυρίζετε την πλάτη σας προς τη βάση για να αποφύγετε περιπτώσεις ανακοινώσεων. Όταν ο μπλε συναγερμός ενεργοποιείται επανειλημμένα, μετακινήστε την κάλτσα και τη βάση πιο κοντά μεταξύ τους για να αποφύγετε τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν το μωρό φοράει την κάλτσα κατά τη διάρκεια του θηλασμού, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός, καθώς η περιεκτικότητα του οξυγόνου φυσιολογικά μειώνεται και ο καρδιακός παλμός αυξάνεται κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Κόκκινος συναγερμός

Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει την ειδοποίηση υψηλότερης προτεραιότητας. Η βάση διαθέτει τρεις τύπους ειδοποιήσεων με κόκκινο χρώμα, οι οποίες αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα και παράγουν έναν υψηλό ήχο.

Χαμηλό επίπεδο οξυγόνου: Θα σας ειδοποιήσει εάν το επίπεδο οξυγόνου του μωρού πέσει κάτω από το 80%.

Χαμηλοί καρδιακοί παλμοί: Θα σας ειδοποιήσει εάν ο καρδιακός παλμός του μωρού πέσει κάτω από 60 παλμούς ανά λεπτό και το επίπεδο οξυγόνου πέσει κάτω από 85%.

Υψηλοί καρδιακοί παλμοί: Θα σας ειδοποιήσει εάν ο καρδιακός παλμός του μωρού ξεπεράσει τους 220 παλμούς ανά λεπτό.

Για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορείτε να διακόψετε τον ήχο οποιουδήποτε ενεργού συναγερμού για 60 δευτερόλεπτα πατώντας σύντομα το πλήκτρο της βάσης ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Η αναστολή θα διακόψει τον ήχο της βάσης και της εφαρμογής - ο φωτεινός δακτύλιος θα συνεχίσει να λάμπει στη βάση και οι λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή. Ο συναγερμός θα παραμείνει ενεργός έως την επίλυση της κατάστασης.

Σε περίπτωση που το έναυσμα (χαμηλό οξυγόνο, χαμηλός ή υψηλός καρδιακός παλμός) σταματήσει κατά τη διάρκεια της παύσης, ο συναγερμός θα σταματήσει.

Όταν ένας νέος συναγερμός με την ίδια ή υψηλότερη προτεραιότητα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας παύσης, αυτός ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από την παύση.

Βάση

Η βάση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock υποδεικνύει τις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας με τις ακόλουθες έγχρωμες λυχνίες:

Σταδιακά αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Λήψη στοιχείων

Έχει πράσινο παλμό: Οι τιμές είναι εντός των φυσιολογικών ορίων.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι εκτός εμβέλειας της βάσης, η μπαταρία είναι νεκρή ή κάτι μπλοκάρει το σήμα

Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα: Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει πέσει από το πόδι.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Ο καρδιακός παλμός ή τα επίπεδα οξυγόνου είναι εκτός του καθορισμένου ορίου.

Έχει άσπρο παλμό: Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock φορτίζει.

Λάμπει με άσπρο χρώμα: Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι πλήρως φορτισμένη.

Σταδιακά αναβοσβήνει με άσπρο χρώμα: Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν είναι αντιστοιχισμένη.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την παρακολούθηση και τη βάση;

Όταν ο αισθητήρας φορτίζει, αφαιρέστε τον από τη θύρα φόρτισης ή πιέστε τη βάση για να τον απελευθερώσετε. Όταν πατήσετε τη βάση, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η βάση θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τη βάση και την παρακολούθηση;

Πιέστε παρατεταμένα τη βάση μέχρι να σβήσει η πράσινη λυχνία και να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Φόρτιση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Τοποθετήστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock στη θύρα φόρτισης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της βάσης και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη της βάσης ανάβει με άσπρο χρώμα.

Επίπεδο φόρτισης της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Στην εφαρμογή μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της έξυπνης κάλτσας Smart Sock.



Όταν η φωτεινή ένδειξη της βάσης πάλλεται με λευκό χρώμα, η κάλτσα φορτίζει. Όταν ανάβει με άσπρο χρώμα, η κάλτσα είναι πλήρως φορτισμένη.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Σε περίπτωση που η εφαρμογή ανιχνεύσει ότι η μπαταρία της Smart Sock θα εξαντληθεί σε λιγότερο από μία ώρα, θα σας ειδοποιήσει με ένα μπλε σινιανουριό. Σε αυτή την

περίπτωση, ωστόσο, η βάση δεν θα κάνει καθόλου ήχο και ούτε θα αναβοσβήνει.

Μπορείτε επίσης να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας οποιαδήποτε στιγμή στην οθόνη κατάστασης της συσκευής.

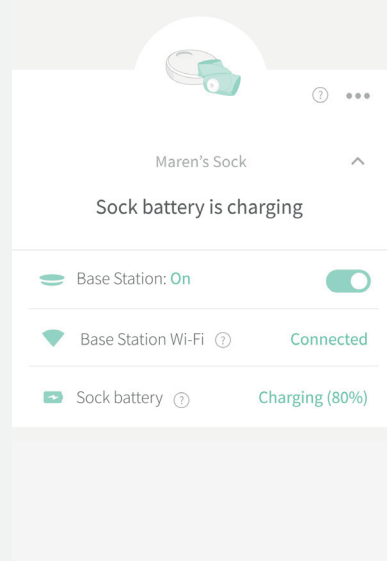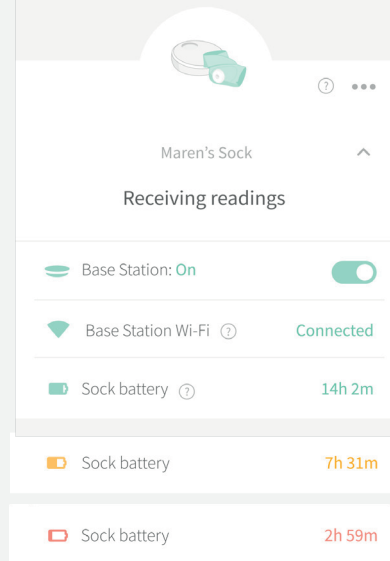

Ιστορικό:


Στην καρτέλα Ιστορικό της εφαρμογής εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες συνεδρίες ύπνου, τα δεδομένα και οι συναγερμοί. Η βάση και η εφαρμογή απαιτούν για την

προβολή του Ιστορικού σύνδεση Wi-Fi.

Τα σχεδιαγράμματα δείχνουν τις μέσες τιμές καρδιακού παλμού, οξυγόνου και ύπνου των τελευταίων 10 λεπτών και ενημερώνονται κάθε 10 λεπτά κατά τη διάρκεια της κάθε

περιόδου ύπνου.

Κατεβάστε τα διαγράμματα για να ανανεώσετε τα δεδομένα ή κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή. Το ιστορικό αποθηκεύει δεδομένα για τις τελευταίες 30 συνεδρίες του ύπνου.

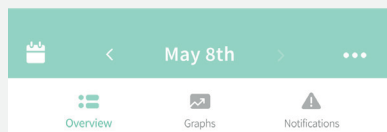

Today's Totals

17hr 4m 99% Avg 145 Avg

Sleep Sessions

May 7-8

8:30 pm - 6:35 am (10 hr 25 min)

Last Night's Sleep

Total Sleep 9 Hrs 23 Min


Sleep Quality Great

Sleep Onset 0 Hrs 7 Min

Longest Sleep Segment 1 Hrs 21 Min

Wakings 2

Low O2 notification(s) 1

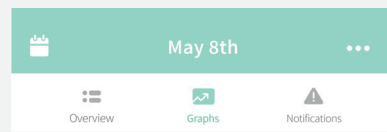

May 8 - 3:35:03 am


10pm 11pm 12am 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am

Light sleep

96%

150 BPM

10pm 11pm 12am 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am

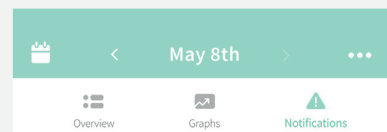

Recent Sock Notifications

Low Oxygen 79% >
May 8, 2019 12:09 AM

Sock Placement Issue (5+) >
May 8, 2019 6:47 AM

Red Notifications >

Μετά το ξύπνημα

Όταν βγάλετε την έξυπνη κάλτσα του παιδιού σας, επιστρέψτε την στη βάση για να φορτίσει.

Φροντίδα και αποθήκευση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Κρατήστε μια δεύτερη έξυπνη κάλτσα Smart Sock στο μέγεθος που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος, ώστε να μπορείτε να εναλλάσσετε τακτικά τις κάλτσες και στα δύο πόδια. Κρατήστε το δεύτερο μέγεθος για μελλοντική χρήση.

Η εταιρεία Owlet συνιστά το πλύσιμο της κάλτσας και του αισθητήρα τουλάχιστον μία φορά στις δύο εβδομάδες για να αποφευχθεί ο ερεθισμός του δέρματος που προκαλείται από τη βρώμικη κάλτσα και τον αισθητήρα. Πλύνετε στο χέρι την κάλτσα και τον αισθητήρα με ήπιο απορρυπαντικό και κρύο νερό.

Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα ξανάχρησιμοποιήσετε.

Πώς να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη βάση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της βάσης και ταυτόχρονα τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της βάσης μέχρι η ενδεικτική λυχνία της βάσης να γίνει πορτοκαλί και να ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα. Πατήστε το πλήκτρο. Το φως στην κάλτσα θα σβήσει. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάλτσα, τοποθετήστε τον αισθητήρα στη θύρα φόρτισης της βάσης.

Συμβουλές και τεχνάσματα

Τοποθέτηση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Να θυμάστε ότι μια λάθος φορεμένη κάλτσα μπορεί να είναι άβολη για το μωρό σας και να προκαλέσει κόκκινα σημεία και φουσκάλες στο πόδι. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί φοράει το σωστό μέγεθος της κάλτσας: είναι σημαντικό η κάλτσα να εφαρμόζει καλά και να μην είναι στενή γύρω από τα δάχτυλα των ποδιών και του αστραγάλου. Συνιστάται να εναλλάσσετε τακτικά τη δεξιά και την αριστερή κάλτσα

Εάν εμφανιστεί ερυθρότητα στο δέρμα του ποδιού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την κάλτσα στο συγκεκριμένο πόδι και χρησιμοποιήστε την στο άλλο πόδι μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς η ερυθρότητα.

Πού πρέπει να τοποθετήσω τη βάση;

Η βάση πρέπει να τοποθετείται εντός της εμβέλειας της χρησιμοποιούμενης έξυπνης κάλτσας για να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του μπλε συναγερμού. Η εμβέλεια Bluetooth είναι έως 30 m. Η βάση έχει σχεδιαστεί για να σας ειδοποιεί εγκαίρως σε περίπτωση

κόκκινου συναγερμού, γι' αυτό σας συνιστούμε να την τοποθετήσετε έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να την ακούτε.

Πώς να δοκιμάσετε τους συναγερμούς

Κόκκινο

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση και αφήστε την παρακολούθηση ενεργοποιημένη. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη βάση μέχρι να ακούσετε τρία ηχητικά σήματα και, στη συνέχεια, αφήστε την. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε ξανά τη βάση ή κάντε παύση του ήχου από την εφαρμογή. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πιέστε παρατεταμένα τη βάση μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη της βάσης και δεν θα ακούσετε ήχο. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά τη βάση για να την ενεργοποιήσετε.

Μπλε συναγερμός

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση και αφήστε την παρακολούθηση ενεργοποιημένη. Κρατήστε τον αισθητήρα και απομακρυνθείτε από τη βάση.

Κίτρινος συναγερμός

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση και αφήστε την παρακολούθηση

ενεργοποιημένη. Τοποθετήστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock στο πόδι του παιδιού σας ή στο δάχτυλο του ενήλικα ώσπου η συσκευή να σημειώσει την ένδειξη. Στη συνέχεια αφαιρέστε την κάλτσα και περιμένετε για λίγο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 60 δευτερόλεπτα.


Πώς να αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο Wi-Fi

Μέσα από τη βάση

Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της βάσης και ταυτόχρονα τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην βάση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της βάσης μέχρι η ενδεικτική λυχνία της βάσης να γίνει πορτοκαλί και να ακούσετε τέσσερα ηχητικά σήματα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βάσης τρεις φορές. Ελέγξτε ότι η λυχνία του Wi-Fi στο κάτω μέρος της βάσης δεν είναι αναμμένη.

Μήπως έχετε στο σπίτι σας ένα παιδί που δεν κάθεται;

Προσπαθούμε να παρακολουθούμε το παιδί σας σε κάθε περίπτωση, αλλά μερικές φορές είναι τόσο ανήσυχο που ο αισθητήρας δεν μπορεί να λάβει τα δεδομένα που χρειάζεται. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή εμφανίζει τα πόδια που κινούνται. Η κίνηση επηρεάζει την ποιότητα των συλλεγμένων δεδομένων, οπότε, για να μην σας ειδοποιεί άσκοπα, η ανίχνευση και οι ειδοποιήσεις διακόπτονται για λίγο μέχρι να εντοπιστούν ξανά ποιοτικές τιμές.

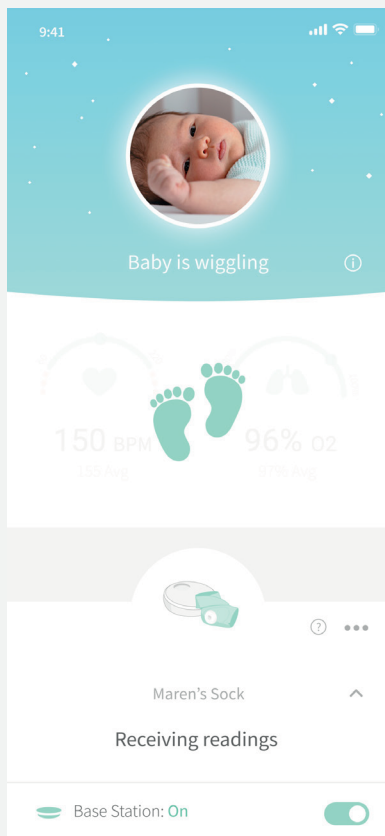

Λειτουργεί η έξυπνη κάλτσα Smart Sock και κάτω από τα παιδικά ρούχα;


Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άνετα κάτω από τις πιτζάμες, τα περιτυλίγματα και τις κάλτσες και για να διασφαλιστεί για το μωρό σας ένας αδιάταραχος ύπνος.

Κοινή πρόσβαση στην εφαρμογή

Η εταιρεία Owlet επεξεργάζεται τη δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών λογαριασμών για κοινή πρόσβαση στην εφαρμογή. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να μοιραστείτε την εφαρμογή με φίλους ή συγγενείς, απλώς δώστε τους τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας.


9:41 📶 🔋

Owlet



Maren's readings are normal

❤️ 145 BPM 🫧 98 % 📱



Mary's readings are normal

❤️ 143 BPM 🫧 99 % 📱

Περισσότερα παιδιά; Δεν υπάρχει πρόβλημα!

Η εφαρμογή Owlet υποστηρίζει τη δημιουργία πολλαπλών προφίλ παιδιών και την ανάθεση οποιασδήποτε συσκευής σε κάθε παιδί. Βεβαιωθείτε ότι το κάθε παιδί έχει τη δική του έξυπνη κάλτσα Smart Sock και την αντίστοιχη βάση,

ώστε σε περίπτωση συναγερμού να μην υπάρχει σύγχυση.

Φωτεινότητα βάσης

Η βάση είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα του φωτός της ανάλογα με το φως στο δωμάτιο.

Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης

Στην εφαρμογή, μεταβείτε στην επιλογή Λογαριασμός > Βοήθεια και υποστήριξη και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας με chat εντός της εφαρμογής, μέσω email και τηλεφώνου ή μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.owletcare.com/>. Για περισσότερες συμβουλές και μυστικά, ανατρέξτε στην καρτέλα Οδηγόι της εφαρμογής.

Αποθήκευση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Ο αισθητήρας της έξυπνης κάλτσας Smart Sock περιέχει μια μπαταρία που θα εξαντληθεί μετά από αρκετό καιρό. Σε περίπτωση πλήρους

αποφόρτισης της μπαταρίας, ο αισθητήρας θα υποστεί βλάβη.

6 βήματα για την αποθήκευση του αισθητήρα της έξυπνης κάλτσας Smart Sock:

1. **Φορτίστε πλήρως τον αισθητήρα.**
2. **Αφαιρέστε τον αισθητήρα από τη βάση.**
3. **Απενεργοποιήστε την κάλτσα σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 176.**
4. **Αποσυνδέστε τη βάση από την τροφοδοσία .**
5. **Αποθηκεύστε τον αισθητήρα, τη βάση, τα καλώδια, το βύσμα και την έξυπνη κάλτσα Smart Sock σε ένα δροσερό, και σε στεγνό μέρος.**
6. **Επαναφορτίζετε τον αισθητήρα κάθε 6 μήνες και στη συνέχεια επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-5.**

Προειδοποίηση / Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Ξύπνηνη κάλτσα Smart Sock της Owlet δεν είναι ιατρική συσκευή.

Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συσκευή ή να αντικαταστήσει μια ιατρική συσκευή. Δεν χρησιμοποιείται και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετριασμό ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας και ιατρικής κατάστασης. Ούτε προορίζεται να διερευνήσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την ανατομία ή οποιαδήποτε φυσιολογική διαδικασία.

Η Ξύπνηνη κάλτσα Smart Sock της Owlet έχει σχεδιαστεί για υγιή μωρά έως την ηλικία των 18 μηνών και τα όρια ειδοποίησης της Ξύπνηνης κάλτσας Smart Sock της Owlet δεν είναι τόσο αυστηρά όσο τα ιατρικά μόνιτορ.

Λάβετε υπόψη σας ότι: αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατάσταση του μωρού σας και δεν προορίζεται για να αντικαταστήσει τη δική σας φροντίδα για το μωρό σας. Είστε υπεύθυνοι για την υγεία και την ευημερία του παιδιού σας και για την τήρηση των αρχών που αφορούν τον ασφαλή ύπνο, την υγεία και τη φροντίδα.

- Μην χρησιμοποιείτε την Ξύπνηνη κάλτσα Smart Sock της Owlet ως διαγνωστικό εργαλείο.
- Μην χρησιμοποιείτε την Ξύπνηνη κάλτσα Smart Sock της Owlet σε περίπτωση που ο γιατρός σας συνιστά τη χρήση νοσοκομειακού παλμικού οξύμετρου ή νοσοκομειακού μηχανήματος παρακολούθησης της αναπνευστικής ανακοπής.
- Μην χρησιμοποιείτε την Ξύπνηνη κάλτσα της Owlet ως δικαιολογία για ακατάλληλες συνήθειες ύπνου.
- Η Ξύπνηνη Κάλτσα της Owlet δεν υποκαθιστά τη φροντίδα του παιδιού από έναν ενήλικα.

Εγγύηση

Η εταιρεία Owlet στήριζει με υπερχρήματα τα προϊόντα της. Τις εγγυήσεις σας μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.owletcare.gr.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση των προϊόντων Owlet υπάγεται στους όρους και τις προϋποθέσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.owletcare.gr. Με την χρήση του προϊόντος της Owlet, συμφωνείτε με τους

ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο: www.owletcare.gr.

Ασφάλεια

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων προσώπων είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο και στην εφαρμογή Owlet Baby Care υπάρχουν

πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε και ακολουθήστε πάντα όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ:

ΟΠΟΤΕ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ.

Η ΞΥΠΝΗΝΗ ΚΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΈΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΟΗΘΗΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

ΓΙΑ ΠΡΩΡΑ ΜΩΡΑ, ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΞΥΠΝΗΝΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ SMART SOCK ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OWLET.



Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τον τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

IC: 21386-OBL3A (βάση)

IC: 21386-OSS3A (αισθητήρας)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των διατάξεων της FCC και συμμορφώνεται με τις καναδικές RSS χωρίς την εξαίρεση άδειας για την κανοντομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιασδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Η εταιρεία Owlet Baby Care δηλώνει ότι η Ξύπνηνη κάλτσα Smart Sock της Owlet συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2.402-2.480 MHz (ισχύς εξόδου 63 mW)

Βάση Bluetooth

2.412-2.462 MHz (ισχύς εξόδου 75 mW)

Δίκτυο Wi-Fi βάσης

2.402-2.480 MHz (ισχύς εξόδου 6,3 mW)

Αισθητήρας του Bluetooth

Η εταιρεία Owlet δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των προϊόντων της Owlet εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.



ΕΙΣΟΔΟΣ: / input 100-240 V~0,2 A 50-60 Hz

ΕΞΟΔΟΣ: / output 5 V, 1 A



800433

Πληροί τις απαιτήσεις των UL 62368-1
και CAN/CSA-C22.2

No. 62368-1

Ευρεσιτεχνίες ΗΠΑ αρ. 9,693,730 και 10,449,837.

Άλλες πατέντες εκκρεμούν.



Σύντομη περιγραφή της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock™ 3 από την Owlet χρησιμοποιεί δύο αισθητήρες για την παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του μωρού σας.



Μέγεθος 1 Μέγεθος 2



Αισθητήρες έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Ο αισθητήρας ανιχνεύει τον καρδιακό παλμό και το επίπεδο οξυγόνου του μωρού σας.



Τα ανοίγματα στην κάλτσα

Ευθυγραμμίστε τους αισθητήρες στο κέντρο των οπών στην κάλτσα.



Ταιριάζει στα πόδια κάθε μωρού

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock από την Owlet ταιριάζει τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό πόδι του μωρού. Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα και ο αισθητήρας βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ποδιού και πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού, μόνο τότε η κάλτσα είναι σωστά εφαρμοσμένη και μπορεί να αποκτήσει τα απαραίτητα δεδομένα.




Δεξί πόδι του μωρού

Η έξυπνη κάλτσα είναι διογκωμένη στο άνω του ποδός.

Αριστερό πόδι του μωρού

Η έξυπνη κάλτσα είναι διογκωμένη στο πέλμα του ποδός.

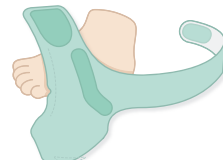

Τοποθέτηση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Μην βάζετε την έξυπνη κάλτσα πολύ σφιχτά. Σε περίπτωση που η λουρίτσα ξεπερνά το Velcro, δοκιμάστε μικρότερο μέγεθος της κάλτσας.

Σύντομη περιγραφή της βάσης

Με μια ματιά στη βάση θα ξέρετε πώς περνάει το μωρό σας.

Ενδεικτική λυχνία της έξυπνης κάλτσας Smart Sock

Πράσινο φως υποδεικνύει ότι η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι συνδεδεμένη με τη βάση.

Εγγραφή


Κατά τη ρύθμιση του προϊόντος, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να πατήσετε αυτό το κουμπί μία φορά.

Ενδεικτική λυχνία δικτύου Wi-Fi

Το πράσινο φως υποδεικνύει ότι η βάση είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη βάση, πατήστε την και απελευθερώστε την. Η βάση εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία σβήνει.

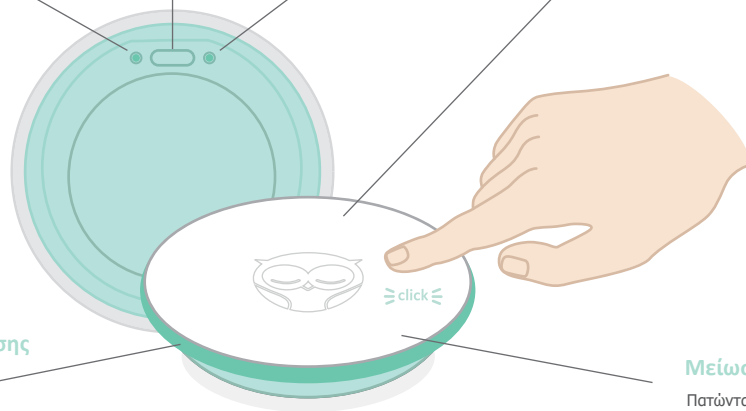

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

Ο φωτεινός δακτύλιος σας ενημερώνει για την κατάσταση του μωρού σας. Για τις λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε στην εφαρμογή.


Μείωση φωτός

Πατώντας παρατεταμένα τη βάση, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτεινής ημέρας και της λειτουργίας χαμηλού νυχτερινού φωτός.

Χρώματα του φωτός στην βάση


Η βάση μπορεί να ανάβει με πέντε χρώματα για να υποδεικνύει διαφορετικές καταστάσεις και να ακούγονται προειδοποιήσεις. Για να ακούσετε σχετικά παραδείγματα, μεταβείτε στην εφαρμογή.

Κατάσταση

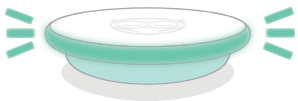


Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Πρώτη μέτρηση του καρδιακού παλμού και των επιπέδων οξυγόνου

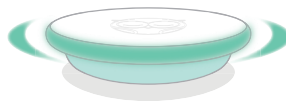

Αργά πάλλεται με πράσινο χρώμα


Ο καρδιακός παλμός και τα επίπεδα οξυγόνου είναι φυσιολογικά.

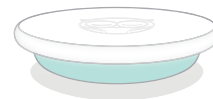

Ανάβει με άσπρο χρώμα


Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι συνδεδεμένη και φορτίζει.

Συναγερμοί

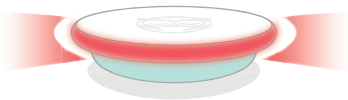


Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Ο καρδιακός παλμός ή το επίπεδο οξυγόνου είναι εκτός του προκαθορισμένου εύρους.

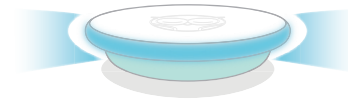

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι αποσυνδεδεμένη από τη βάση.

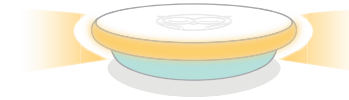

Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock έχει πέσει από το πόδι, είναι λάθος τοποθετημένη ή λάθος ευθυγραμμισμένη.


Ξεκινάμε

1

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή MicroUSB για να συνδέσετε το ηλεκτρονικό εξάρτημα της έξυπνης κάλτσας Smart Sock με τη βάση.

2

Συνδέστε τη βάση στην πρίζα. Η έξυπνη κάλτσα Smart ξεκινά τη φόρτιση.

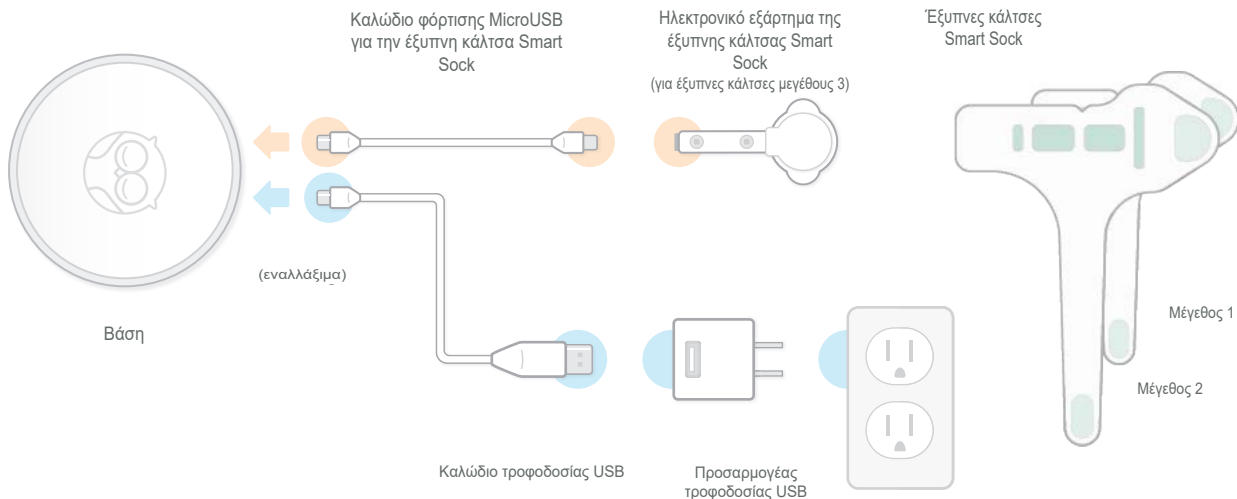


3

Κατεβάστε την εφαρμογή Owlet και ρυθμίστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock™ και τη βάση σας.

4

Με την οθόνη παρακολούθησης μωρών της Owlet που θα σας βοηθήσει να προσέχετε το μωρό σας, μπορείτε να κοιμηθείτε και πάλι ήσυχοι. Χρησιμοποιήστε τη βάση ως κύριο σύστημα ειδοποίησης και την εφαρμογή ως δευτερεύον σύστημα.

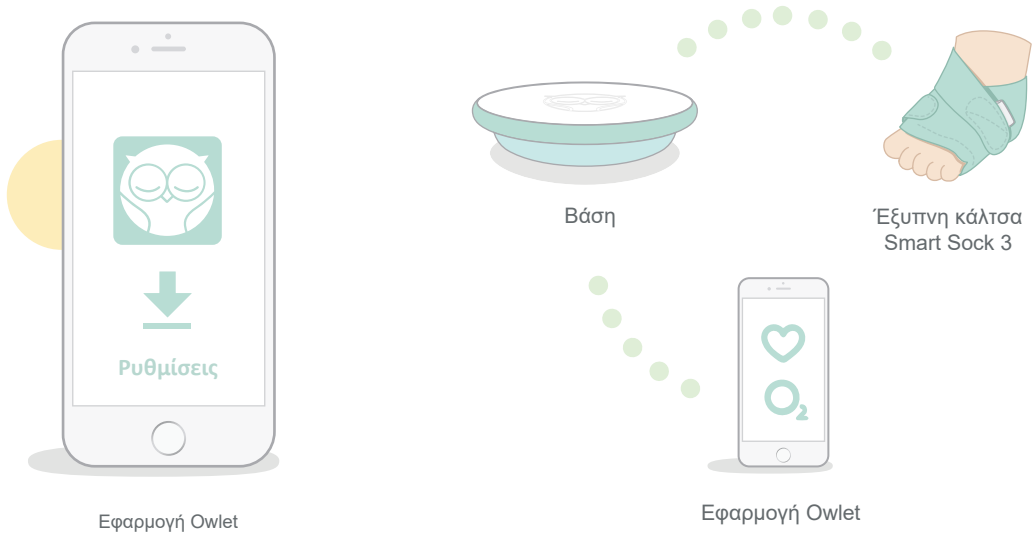

Πληροφορίες για περιορισμένη εγγύηση και αποποίηση ευθύνης

SMART SOCK 3

Η εταιρεία Owlet εγγυάται ότι οι έξυπνες κάλτσες Smart Sock™ 3 από την Owlet θα είναι υπό κανονική χρήση και συντήρηση απαλλαγμένη από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, όπως αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση παρέχεται μόνο στον πραγματικό αγοραστή αυτής της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3 από την Owlet.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock της Owlet και η εφαρμογή Owlet προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα φροντίδας του παιδιού και δεν προορίζονται να αντικαθίστουν ή να χρησιμοποιούνται χωρίς την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενηλίκου.

Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet έχει σχεδιαστεί για τα υγιή παιδιά και τα όρια για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού στην έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet δεν είναι επομένως τόσο αυστηρά όσο στις ιατρικές οθόνες.

- Μην χρησιμοποιείτε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet ως διαγνωστικό εργαλείο.
- Μην χρησιμοποιείτε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet, εφόσον ο γιατρός σας συνιστά τη χρήση υαλοκαταστάσεων παλμικού οξυμέτρου.
- Μην χρησιμοποιείτε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet, εφόσον ο γιατρός σας συνιστά τη χρήση του μόνιτορ αναπνευστικής ανακοπής του υαλοκαταστάσεων.
- Μην χρησιμοποιείτε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock 3 της Owlet ως δικαιολογία για επικίνδυνες συνήθειες κατά τον ύπνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πολλές χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση και συντήρηση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3 της Owlet. Για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν διαβάσετε πρώτα τις συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορεί να μην χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή σελίδα www.owletcare.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων προσώπων είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο και στην εφαρμογή Owlet Baby Care υπάρχουν πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε και ακολουθήστε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλες επιπτώσεις εκτός από τραυματισμό ατόμων, π.χ. ζημιά σε αγαθά.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα προειδοποιητικό σύμβολο και τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ", "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ", "ΠΡΟΣΟΧΗ" ή "ΠΡΟΣΟΧΗ". Οι λέξεις αυτές σημαίνουν:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων/ ή ζημιά σε αγαθά.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέπειες εκτός από σωματικές βλάβες, π.χ. υλικές ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η έξυπνη κάλσα Smart Sock 3 δεν είναι ιατρική συσκευή. Η κάλσα Smart Sock 3 της Owlet σας ειδοποιεί όταν ο καρδιακός παλμός ή το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του παιδιού σας είναι εκτός ενός καθορισμένου πλαισίου. Η κάλσα Smart Sock 3 της Owlet προορίζεται για νεογέννητα έως δεκαεπτά (16) μηνών και όχι για παιδιά άνω των δεκαεπτά (16) μηνών. Η έξυπνη κάλσα Smart Sock 3 δεν είναι ιατρικό προϊόν. Έξυπνη κάλσα Smart Sock 3.

- Δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετρισμό, την παρακολούθηση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή άλλου τραυματισμού.
- Δεν επιπρεάζει τη λειτουργία ή τη δομή του σώματος.
- Δεν επιτυγχάνει τους βασικούς επιδιωκόμενους σκοπούς της με την επίδραση χημικών ουσιών.
- Δεν αποτρέπει το σύνδρομο ακριθιδίου βρεφικού θανάτου (ΣΑΘΒ).

Ο κύριος σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι τα εξής: Παροχή βασικών οδηγιών και συστάσεων προς τον χρήστη για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση της έξυπνης κάλσας Smart Sock 3 της Owlet και περιγραφή των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, των ασφαλιστικών μέτρων, της συντήρησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων της έξυπνης κάλσας Smart Sock 3 της Owlet. Είναι πολύ σημαντικό για όλα τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν ή θα ρυθμίσουν αυτή την έξυπνη κάλσα Smart Sock 3 να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά την έξυπνη κάλσα Smart Sock 3 της Owlet και να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες.

Εάν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω του email: owletcare.gr@certus-mercatus.com.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



- **ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΟ.**
- **Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΛΤΣΑ SMART SOCK 3 ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΛΑ ΈΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.**
- **ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΡΑ ΜΟΡΦΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΡΦΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ SMART SOCK 3 ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET.**
- **ΟΠΟΤΕ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ FCC



Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με μη αδειοδοτημένες καναδικές RSS χωρίς εξαίρεση για την κανινομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Επίλυση προβλημάτων

Αρχικές ρυθμίσεις | Συναγερμοί | Σύνδεση

Αρχικές ρυθμίσεις

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν μπορώ να δω το δίκτυο Wi-Fi κατά την εγκατάσταση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν είναι ενεργοποιημένη.■ Η βάση είναι ήδη συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.■ Η βάση είναι εκτός εμβέλειας.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε τη βάση στην πρίζα.■ Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία δικτύου Wi-Fi στο κάτω μέρος της βάσης είναι αναμμένη. Σε περίπτωση που είναι αναμμένη, παραλείψτε αυτό το βήμα και συνεχίστε με τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.■ Τοποθετήστε τη βάση πλησιέστερα στο ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν βλέπω το οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi στην εφαρμογή Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Το ρούτερ σας χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνότητων 5 GHz (η συσκευή της Owlet υποστηρίζει μόνο τη ζώνη συχνότητων 2,4 GHz).■ Ενδεχομένως να έχετε κρυφό ρούτερ.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 2,4GHz (τα περισσότερα ρούτερ των 5GHz υποστηρίζουν επίσης δίκτυο 2,4GHz).■ Για οδηγίες σχετικά με τα κρυφά ρούτερ, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none">■ Λάθος κωδικός πρόσβασης■ Η βάση βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi σας.■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυό σας.■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στο ρούτερ πριν από τη ρύθμιση και όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση τοποθετήστε τη βάση στο δωμάτιο του παιδιού.■ Δοκιμάστε να κάνετε επανεικκίνηση του τηλεφώνου σας και να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi.■ Επισκεφτείτε το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση ανάβει με άσπρο χρώμα όταν η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι αποσυνδεδεμένη.	<ul style="list-style-type: none">■ Ενημέρωση λογισμικού σε εξέλιξη.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock ξανά στη βάση μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί με το λογαριασμό μου Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Κρατήστε πατημένο το μικρό πλήκτρο καταχώρησης/Εγγραφή	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Πατήστε και αφήστε (μην κρατάτε πατημένο) το μικρό κουμπι Εγγραφή στο κάτω μέρος της βάσης και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά με το λογαριασμό σας Owlet.■ Συνδέστε τη συσκευή iOS στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz στο οποίο είναι συνδεδεμένη η βάση.

*Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο owletcare.gr@certus-mercatus.com

Συναγερμοί

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με μπλε χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση της ξύπνης κάλτσας Smart Sock είναι εκτός εμβέλειας. ■ Το σώμα του γονα ή άλλου ατόμου που φροντίζει το μωρό εμποδίζει τη σύνδεση μεταξύ της ξύπνης κάλτσας και της βάσης. ■ Χαμηλή ή νεκρή μπαταρία 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στην ξύπνη κάλτσα Smart Sock. ■ Αλλάξτε τη θέση του μωρού ή σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε το μόνιτο κατά το τάξιμα, την αλλαγή πάνας, την αγκαλιά κ.λπ. ■ Φορίστε την ξύπνη κάλτσα Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με κόκκινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Χαμηλός ή υψηλός καρδιακός παλμός ■ Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ■ Η ξύπνη κάλτσα δεν εφαρμόζει στο πόδι. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η ξύπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα. ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα τμήματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια υφασμάτινη κάλτσα με διαφορετικό μέγεθος.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοβλίνει με κίτρινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προβλήματα με την απόκτηση δεδομένων ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Το φως στο δωμάτιο είναι πολύ έντονο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η ξύπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα και μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει έναν συναγερμό χωρίς λόγο). ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα ανολίγματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Χαμηλώστε τα φώτα στο δωμάτιο.

Σύνδεση

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση βρίσκεται εκτός εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi. ■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση και το ρούτερ Wi-Fi πιο κοντά μεταξύ τους (ενισχυτές Wi-Fi και άλλα ρούτερ δεν θα λύσουν το πρόβλημα). ■ Επικοινωνήστε με το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν φορτίζει. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock δεν είναι πλήρως ενεργοποιημένη. ■ Η ξύπνη κάλτσα απαιτεί επαφή. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφήστε την ξύπνη κάλτσα Smart Sock να φορτίσει μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να αναβοβλίνει πράσινη ένδειξη. ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρονικό εξάρτημα της ξύπνης κάλτσας Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Οι παύλες είναι ορατές αντί των ενδείξεων του καρδιακού παλμού και του επιπέδου οξυγόνου. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ξύπνη κάλτσα Smart Sock προσπαθεί να πάρει μια αβέβαιη ένδειξη. ■ Το μωρό κουνάει πολύ το πόδι του. ■ Ακατάλληλη τοποθέτηση της ξύπνης κάλτσας Smart Sock ■ Ακατάλληλη εφαρμογή της υφασμάτινης κάλτσας 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στο κέντρο των τμημάτων της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Μην βάζετε το μωρό σας στην κούνια ή στα μαξιλαράκια δόνησης, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. ■ Βεβαιωθείτε ότι η ξύπνη κάλτσα Smart Sock έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέγεθος της υφασμάτινης κάλτσας.

Συμβουλές για ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές συμβουλές για το πώς να εξασφαλίσετε έναν υγιή και ασφαλές ύπνο στο δωμάτιο σας.

- Το δωμάτιο πρέπει να είναι μόνο του στο κρεβάτι και να είναι ξαπλωμένο ανάσκελα. Ο ύπνος στο πλάι ή μπρούμυτα δεν είναι ασφαλής για τα μωρά.
- Προμηθευτείτε μια κούνια για το δωμάτιο σας που πληροί τα τρέχοντα κριτήρια ασφαλείας. Επίσης αγοράστε ένα σταθερό στρώμα που να ταιριάζει καλά στην κούνια και καλύπτει το με ένα καλά προσαρμοσμένο σεντόνι.
- Μην τοποθετείτε μαλακά, χαλαρά και χνουδωτά αντικείμενα στην κούνια. Περιλαμβάνονται μαξιλάρια, κουβέρτες, παπλώματα, επενδύσεις βρεφικών κρεβατιών, λούτρινα ζώακια, παιχνίδια και οποιαδήποτε άλλα μαλακά αντικείμενα.
- Αντί για μια παραδοσιακή κουβέρτα, χρησιμοποιήστε μια βρεφική κουβέρτα που μπορεί να κουμπώσει όπως ένα ρούχο ή μια παρόμοια κουβέρτα που θα κρατήσει το δωμάτιο σας ζεστό και ασφαλές.
- Μοιραστείτε ένα δωμάτιο με το δωμάτιο σας, αλλά όχι ένα κρεβάτι. Το δωμάτιο σας θα πρέπει να κοιμάται σε ξεχωριστό κρεβάτι κοντά στο κρεβάτι σας. Θα τον κρατήσει ασφαλές και θα διευκολύνει το τάισμα. Εάν το δωμάτιο κοιμάται μαζί σας, η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν θα λειτουργεί σωστά. Το σώμα σας θα μπορούσε να παρεμποδίσει το ασύρματο σήμα της κάλτσας.
- Μην κοιμάστε με το δωμάτιο στο κρεβάτι σας, στον καναπέ ή σε μια καρέκλα.
- Μην αφήνετε ποτέ το δωμάτιο σας να κοιμάται σε μαλακές επιφάνειες, όπως είναι τα κρεβάτια ενηλίκων ή παιδιών, οι καναπέδες, οι καρέκλες, τα στρώματα νερού, τα μαξιλάρια, τα μαξιλαράκια, οι κουβέρτες, τα δέρματα από πρόβατα και παρόμοια αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε μαξιλάρια, πλατφόρμες τοποθέτησης και μαξιλάρια στερέωσης για να στηρίξετε το δωμάτιο, να το κρατήσετε ή να το αποτρέψετε από το να γυρίσει.
- Φροντίστε ώστε το δωμάτιο να μην ζεσταθεί υπερβολικά. Φορέστε του ελαφριές πιτζάμες και διατηρήστε στο δωμάτιο μια θερμοκρασία που να είναι άνετη για έναν ελαφρά ντυμένο ενήλικα.
- Σκεφτείτε πριν προσφέρετε στο δωμάτιο σας πιπίλα κατά τη διάρκεια του απογευματινού και του βραδινού ύπνου. Να προσφέρετε στα δωμάτια πιπίλα σε ηλικία 3-4 εβδομάδων, όταν έχουν συνηθίσει το θηλασμό.
- Ενημερώστε όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν το δωμάτιο σας για αυτές τις αρχές για ασφαλές ύπνο!



Δήλωση συμμόρφωσης Owlet

Κατασκευαστής: Owlet Baby Care

Προϊόν: Owlet Smart Sock 3

Αριθμός μοντέλου: OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3ης Γενιάς

Περιγραφή προϊόντος:

Η Έξυπνη Κάλτσα Owlet Smart Sock αποτελείται από δύο εξαρτήματα: το σταθμό βάσης (OBL) και τον αισθητήρα της κάλτσας (OSS). Ο αισθητήρας της κάλτσας χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα PPG για να μετράει τους καρδιακούς παλμούς και τα επίπεδα οξυγόνου του παιδιού, όταν φοριέται στο πόδι του χρήστη. Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion. Μεταδίδει τα δεδομένα pulse-ox στο σταθμό βάσης μέσω Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE). Χρησιμοποιεί ένα Nordic nRF52840 IC που υποστηρίζει την τυπική διαμόρφωση BLE και τις τεχνικές επικοινωνίας. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί μια 3D διπλωμένη μεταλλική κεραία εσωτερικά στο πλαστικό περίφραξης.

Όνομα Αντιπροσώπου: Obelis S.A

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου εκπροσώπου: Λεωφόρος Général Wahis 53, B-1030 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Τηλ: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03

Email: mail@obelis.net

Εκπρόσωπος: κ. Γεδεών ΕΛΚΑΥΑΜ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει, εκ μέρους της Owlet Baby Care of Lehi, Utah, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη της Owlet Baby είναι σύμφωνο με τις διατάξεις:

- Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Συμβουλίου (16 Απριλίου 2014) – Ραδιοεξοπλισμός
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Χαμηλή τάση

- Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Συμβουλίου (08 Ιουνίου 2011) – Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών
- Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου (03 Δεκεμβρίου 2001) – Γενική ασφάλεια προϊόντων
- Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Συμβουλίου (04 Ιουλίου 2012) – Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο Τεχνικός Φάκελος που απαιτείται από την παρούσα Οδηγία τηρείται στα κεντρικά γραφεία της Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Λέχι, Γιούτα.

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2021

Tammy Lavery

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs